

SEHTEST FÜR LESEBRILLEN

1. Drucken Sie diesen Lesebrillen-Sehtest im DIN A4 Format aus.
2. Kontrollieren Sie mithilfe der untenstehenden Skala, ob das Blatt masstabsgerecht ausgedruckt wurde.



3. Lesen Sie (ohne Brille) die unten stehenden Zeilen beginnend mit der kleinsten Schriftgrösse (ganz oben) im Abstand von ca. 35 cm.
4. Können Sie die erste Zeile nicht lesen, springen Sie zur nächst grösseren darunter und versuchen es hier.
5. Das machen Sie solange, bis Sie bei der Zeile angekommen sind, die Sie kristallklar lesen können.
6. Rechts neben dieser Zeile finden Sie die zu Ihren Augen passende Sehstärke.

Wenn Sie dies kristallklar lesen können,
wählen Sie eine Lesebrille mit der Stärke:

+1.00

Wenn Sie dies kristallklar lesen können,
wählen Sie eine Lesebrille mit der Stärke:

+1.50

Wenn Sie dies kristallklar lesen können,
wählen Sie eine Lesebrille mit der Stärke:

+2.00

Wenn Sie dies kristallklar lesen können,
wählen Sie eine Lesebrille mit der Stärke:

+2.50

Wenn Sie dies kristallklar lesen können,
wählen Sie eine Lesebrille mit der Stärke: **+3.00**

Wenn Sie dies kristallklar lesen können,
wählen Sie eine Lesebrille mit der Stärke: **+3.50**